Protocole n°1 Bibliothèque sous Exocad




Installer la bibliothèque Zfx sous Exocad

Avant de démarrer l'installation, demander la création des codes d'installation à Alexandra puis se connecter au portail Zfx : www.zfx-portal.com



Pour installer la bibliothèque :


- x Connectez-vous avec l'identifiant fourni correspondant à votre numéro de client Zfx Exemple : identifiant = default@zfxlyon2056 / mot de passe : fourni par mail
- x Dans le bandeau cliquez sur Downloads
- x Rubrique Zfx
- x Puis téléchargez l'App Manager Zfx

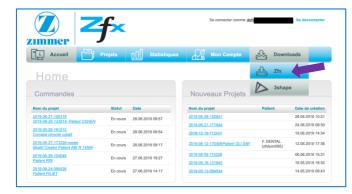




Une fois l'App Manager Zfx installé, se connecter avec les mêmes identifiants que précédemment

Entrer les codes fournis par Alexandra pour les bibliothèques et les matières dans la section suivante :

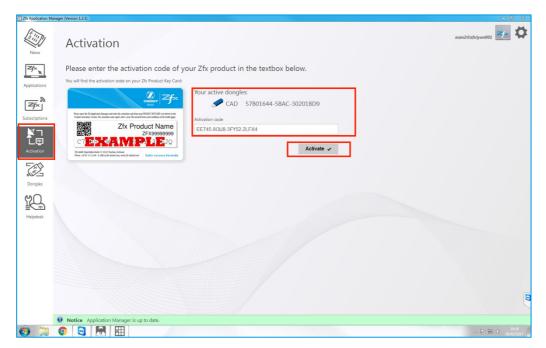

Retourner dans la zone Application

Télécharger en cliquant sur la flèche

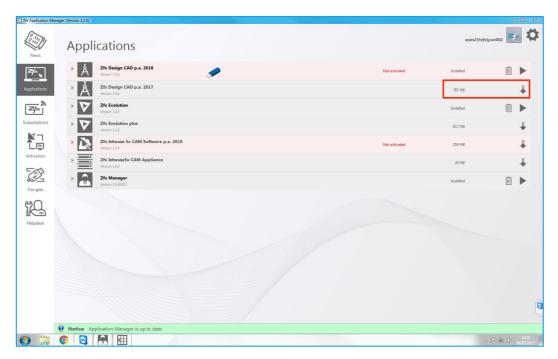

Installer:

- Workparameters
- Bibliothèque
- Manager

Attention à ce que les chemins d'accès soient ceux de la version du logiciel utilisé. Sinon l'installation ne fonctionnera pas.

Ouvrir la DB Exocad pour explication au client

Avant de commencer, choisir dans options de configuration matières en bas à gauche, les workparameters Zfx DB 4.1 et créer la fiche de travail de manière classique avec les matières Zfx.

Réaliser le travail comme d'habitude

Attention : bien expliquer le choix des localisateurs en fonction des connectiques (se reporter à la fiche pratique dédiée)

A la fin du cas deux solutions :

- Usinage en interne
- Envoi du cas pour usinage chez Zfx

Pour envoyer le cas chez Zfx vous devez utiliser la passerelle Zfx Manager

Ouvrir le logiciel Manager en cliquant sur le logo sur le bureau





Cliquez en haut à gauche sur Projets La liste des projets s'ouvre Sur cette page cliquez en haut à droite sur Importer.



2017-02-28-164941: patient test

Milling Center
Save as default

Edit Control

Scan2@zhdyen001

Sélection rapide
Seules les données de conception

Nom de fichier

Taille

2017-02-28-164941-10

104-072

104-072

104-072

104-072

104-072

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017-02-28-164941-10

2017

33 533 217

La fenêtre d'accès s'ouvre, rendez vous dans le dossier où sont enregistrés tous les cas Exocad. Ouvrez votre cas, sélectionnez votre fichier construction info puis cliquez sur ouvrir.

Le Manager va sélectionner automatiquement les fichiers nécessaires à la fabrication dans notre centre d'usinage et afficher une fenêtre vous demandant de valider la sélection en cliquant sur « Soumettre » en bas à droite de la fenêtre.


Attendez quelques minutes la fin du téléchargement!




Pour valider votre commande vous devez cliquer sur l'onglet Commande en haut au milieu de votre écran afin d'accéder à la validation.

2017-02-28-164941 CTR

En cliquant l'écran qui suit apparaît avec un devis en direct.

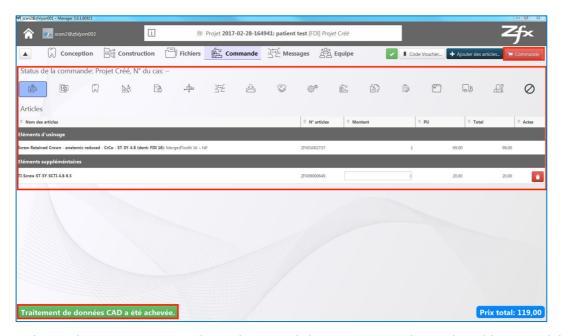

En haut à droite cet écran vous devez cliquer sur le bouton commande avec le caddy pour valider la commande et accepter les conditions générales.

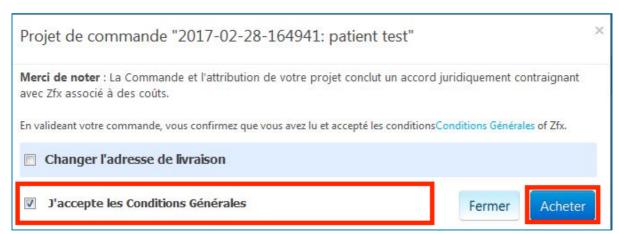

Vous remarquerez que les boutons de commande sont floutés et ne sont plus accessibles et que le petit logo encadré ci-dessous est surligné en bleu.



Merci pour votre commande et votre confiance!